



KURZANLEITUNG – DEUTSCH



eFOLDi

Aufklappen des eFOLDi Elektrorollstuhls

Bevor Sie beginnen, stellen Sie den Elektrorollstuhl an einem offenen Ort abseits von Haustieren und kleinen Kindern auf.

Das Aufklappen ist unkompliziert und mit ein wenig Übung in Sekunden aufgebaut.

Wir empfehlen Ihnen, mit dem Elektrorollstuhl zu üben, bevor Sie sich zum ersten Mal auf den Weg machen.



FOLDING VIDEO



1 Anti-Kipp-Räder und Batterieladegerät werden mit Ihrem Elektrorollstuhl geliefert.

2 Installieren Sie die Anti-Kipp-Räder, falls gewünscht. Diese werden einfach gedrückt und rasten ein.

3 Entfalten Sie den Elektrorollstuhl, indem Sie einfach die Sitzfläche nach unten drücken.



4 Halten Sie das Controller-Kabel von Quetschstellen wie den Armlehnenstützen fern.

5 Installieren Sie die Armlehnenstützen in den Schlitzen und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrasten.

6 Nehmen Sie die Steuereinheit und...



7 ...Steuerstab in den Armlehnenbeschlag unter der Armlehne einführen...

8 ...die Position des Reglers einstellen und mit dem Rändelknopf festziehen.

9 Entfernen Sie die Begleitsteuerung aus der Gesäßtasche und befestigen Sie sie an der Stange hinten.



10 Fußstütze nach unten ziehen.

11 Sitzkissen wie abgebildet einbauen. Diese werden durch Klettverschlüsse gehalten...

12 ...stellen Sie sicher, dass diese über die Rückenlehne und unter den Sitz geklappt sind. Der Elektrorollstuhl ist jetzt bereit.

Zusammenklappen des eFOLDi Elektrorollstuhls



- 1** Rändelknopf leicht lösen und Regler abnehmen.



- 2** Platzieren Sie den Controller und das Sicherheitsgurtband auf dem Sitz.



- 3** Entfernen Sie die Begleitsteuerung und stecken Sie sie in die Tasche an der Rückseite des Stuhls.



- 4** Stellen Sie sicher, dass sich beide Armlehnen in ihrer höchsten Position befinden..



- 5** .. durch Drücken des kleinen silbernen Knopfes zum Einstellen der Armlehnen.



- 6** Überprüfen Sie, ob die Vorderräder voraus positioniert sind, um ein reibungsloses Zusammenklappen zu gewährleisten.
Tipp Ziehen Sie den Stuhl nach hinten, um die Räder auszurichten



- 7** Greifen Sie dann unter die Kante des Sitzes und ziehen Sie die Entriegelungsstange nach oben, um den Sitz zu lösen und..



- 8** ..ziehen Sie den Sitz nach oben, um den Elektrorollstuhl zusammenzuklappen.



- 9** ußstütze einklappen.

Betrieb des eFOLDi Elektrorollstuhls



Batterien können entfernt werden, indem die rote Lasche nach oben gedrückt und nach hinten gezogen wird.



Hier schalten Sie die Hauptstromversorgung ein, die den Handset-Controller mit Strom versorgt.
Schalten Sie diese immer aus, wenn der Rollstuhl nicht verwendet wird, um Batteriestrom zu sparen.



Schalten Sie den Handset-Controller ein.
Die Fernbedienung des Handgeräts verfügt über Tasten zum Einstellen der Geschwindigkeit und Anzeigen zur Anzeige der verbleibenden Leistung und der Geschwindigkeitseinstellung